


Milí priatelia, zákazníci a partneri,

ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu v roku 2014, v ktorom sme nainštalovali stý systém TomoCon PACS.

Prajeme krásne a pokojné Vianoce a veľa osobných aj pracovných úspechov v roku 2015.

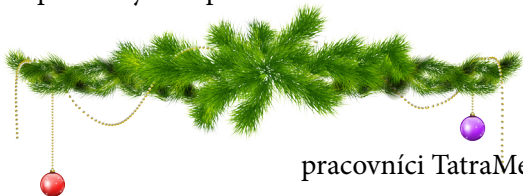

pracovníci TatraMed Software s.r.o.


TomoCon®

diagnostika, archivácia a
správa obrazových dát

Čo je nové v TomoCon 20

Ortogonalná MPR pracovná plocha

- Špeciálna pracovná plocha s MPR, ktoré môžu byť na seba navzájom kolmé. Zobrazuje sa nad existujúcou pracovnou plochou a aktuálne usporiadanie pohľadov sa obnoví po jej zatvorení. Umiestnenie segmentov je možné vybrať z niekoľkých prednastavených rozložení pracovnej plochy.
- V ortogonalnej MPR pracovnej ploche sa zobrazuje aj manuálna registrácia a úprava MIR. Po ich zavretí sa teda zachová pôvodné rozloženie pracovnej plochy.

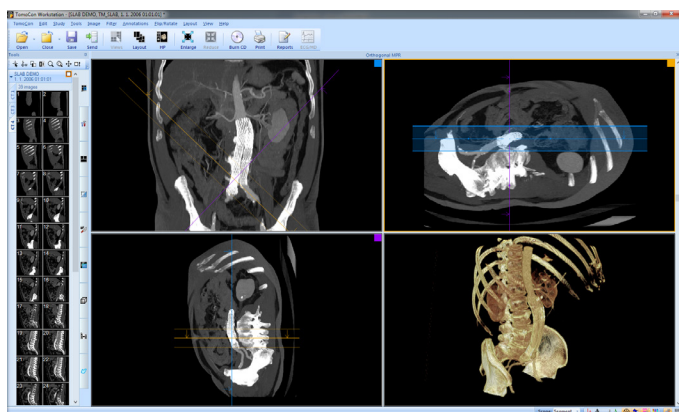

Novinky v kvantitatívnej analýze

- Súbor snímok pre analýzu sa definuje už pri jej vytváraní. Analýzu je možné zadefinovať medzi viacerými sériami alebo v rámci jednej série.
- Výsledky merania je možné zobraziť rôznym spôsobom: Absolútny, Rozdielový a Normalizovaný.
- Nové možnosti nastavenia pre os X a zmeny zobrazenia grafu.

Pohodlnejšie otváranie predchádzajúcich štúdií

- Umožnenie vyhľadať predchádzajúce štúdie k už otvorenej štúdiu vo vybranom vzdialenom DICOM úložisku alebo v lokálnych štúdiách podľa nastavených kritérií.
- Pri otváraní a sťahovaní predchádzajúcich štúdií je možné považovať štúdie z jedného dňa za jednu (podľa voľby používateľa).

Rozšírenie nastavenia palety náhľadov

- Pribudli ďalšie typy zobrazenia snímok série: Len prvá snímka, Len prostredná snímka a Prvá, prostredná. Všetky náhľady snímok v štúdiách je možné zobraziť naraz pomocou kontextovej ponuky.

Podpora 5-tlačidlovej myši

- Pri 5-tlačidlových myšiach sa dajú mapovať preddefinované funkcie pre štvrté a piate tlačidlo myši.

Zjednodušenie úpravy lekárskej správy

- Vytvorenie novej lekárskej správy podľa šablóny je jednoduchšie vďaka možnosti zadefinovania predvolenej šablóny. Ťuknutím myši pod upravovaným textom sa textový kontajner vkladá automaticky.

TomoCon 20 bude distribuovaný začiatkom r. 2015. Ohľadom aktualizácie licencií softvérových staníc TomoCon kontaktujte Zákaznícke centrum spoločnosti TatraMed Software s.r.o.

Noví registrovaní používatelia T3C

V druhom polroku 2014 sme registrovali:

- ALFAMEDIS s.r.o., Prešov
- ALFAZVOLEN2 s.r.o.
- RTG pracovisko JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., Komárno
- Mestská poliklinika, Pezinok
- ZELENÝ SEN, s.r.o., Banská Bystrica
- FUTURUM, s.r.o., Bytča
- ALFAMEDIC s.r.o., Lučenec

